


## Instrucciones para instalar la actualización de software

A continuación, le mostramos paso a paso, cómo realizar la descarga:

1. Descargue la actualización de software en el área de descargas del sitio web de scil, o bien, a través de este link.  
<https://www.scilvet.es/productos/laboratorio/Bioquimica/element-rcx/>
2. El software de actualización se incluye en el archivo .zip.
3. Extraiga del .zip los 2 archivos y cópielos en la memoria USB
4. Asegúrese de que los siguientes archivos estén en la memoria USB.

Actualización Element RCX/VB1 wifi:

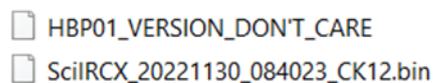

**Nota:** AK09 para los usuarios de Skyla VB1 clásica (No wifi)

5. Inserte la memoria USB en un puerto USB libre en la parte posterior del elemento RCX/Vb1.
6. Encienda el analizador y espere a que termine de calentarse.
7. Toque el *menú " Configuración / Configuración del administrador / Actualizar sistema"*.
8. La actualización se instalará automáticamente. Una vez completada la instalación, se reiniciará el software del dispositivo. Espere hasta que se muestre el menú de inicio y luego retire la memoria USB. Esperamos a que finalice el proceso.
9. Una vez finalizado, comprobamos si la versión de software es la nueva, para ello pulsamos: *Configuración / Configuración general del sistema/ Versión de software*

Cualquier duda o problema que se presente en la instalación, no duden en contactarnos por nuestros canales habituales, [servicio-Es@scilvet.com](mailto:servicio-Es@scilvet.com), o bien, en nuestro teléfono de asistencia técnica 948 82 46 55 o 948 82 17 13 **Extensión 1**. Estaremos encantados de poder ayudarle.