



Instrucciones para instalar la actualización de software


1. Descargue el archivo en una memoria USB en blanco en nuestra sección de descargas:
<https://www.scilvet.de/downloads>

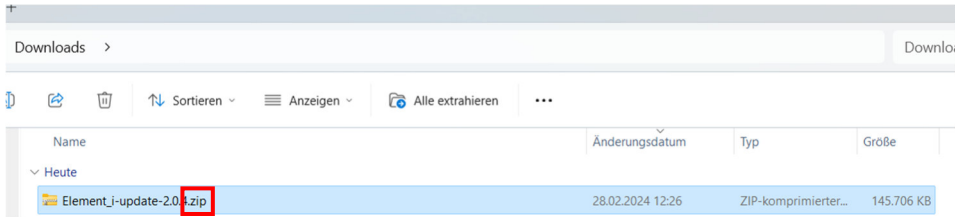

2. Extraiga el archivo en una memoria USB vacía.

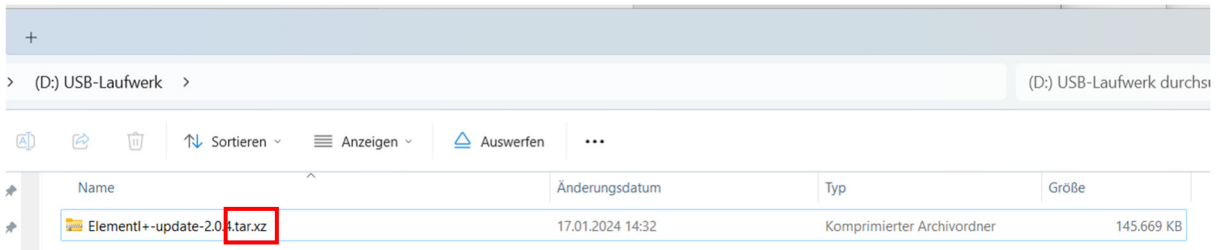

3. Ahora hay un archivo con la terminación .tar.xz.
4. Encienda el analizador Element I+
5. Haga clic en el icono de "engranaje" en la esquina superior derecha para acceder a la opción de menú Configuración.

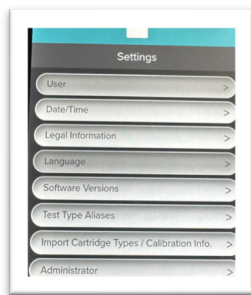


6. Seleccione "Administrador"
7. Para el nombre de usuario: admin y para la contraseña: admin.



8. Seleccione la opción de menú "Actualización del sistema". Conecte la memoria USB que contiene la actualización de software a un puerto USB en la parte posterior del dispositivo. Asegúrese de que solo esta unidad flash USB esté en el dispositivo.
9. Confirme que la actualización de software está disponible a través de un puerto USB y haga clic en **"ACTUALIZAR AHORA"**.



Una vez instalada la actualización (~10 minutos), será necesario reiniciar la instalación para completarse.

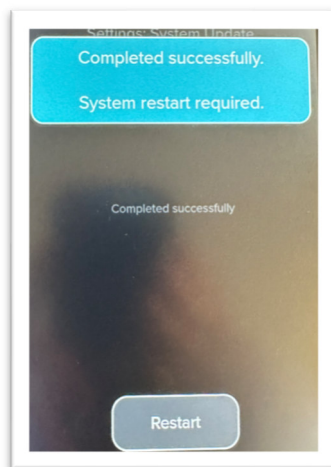

10. Vuelva a encender el Element I+ Analyzer.
11. En el icono "Engranaje" de Configuración, verifique si el dispositivo ahora muestra la versión de software 2.0.4.

Solución de problemas cuando no se detecta la actualización en la unidad USB:

1. Haga clic en el botón "Comprobar unidad USB" para obligar al analizador a escanear la unidad de nuevo en busca de actualizaciones.
2. Asegúrese de que no haya otras unidades flash USB conectadas al dispositivo
3. Use un puerto USB diferente en la parte posterior del dispositivo y haga clic en "Verificar unidad USB".
4. Algunas unidades flash USB de gran capacidad están formateadas de forma predeterminada con un sistema de archivos que no es compatible con el elemento i+ Analyzer. Pruebe con una memoria USB diferente, posiblemente con una capacidad menor.