



Instrucciones de actualización del Element RC

Se requiere un USB vacío.


- Descargue la actualización de software en el siguiente enlace:
<https://www.scilvet.es/productos/laboratorio/bioquimica/element-rc/>
- Vaya a la pestaña Downloads de la sección Element RC. Presione “Actualización de Software V.1.00.01.44.”
- Obtendrá en descargas de su PC un archivo. Zip, como este. **No lo abra.**

 1.00.01.44.zip


- Cree **en su USB** una carpeta con este nombre: **upgradepackage**, en la unidad USB.

 upgradepackage

- **Copie la carpeta .zip** de la actualización tal cual, **dentro de esta carpeta creada:** upgradepackage.
- Expulse la memoria USB del PC.
- Apague el analizador Element RC.
- Inserte la unidad USB en uno de los puertos USB de la parte posterior inferior del analizador.
- Encienda el instrumento.
- El analizador detectará automáticamente la presencia de una nueva actualización.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y confirme con OK.

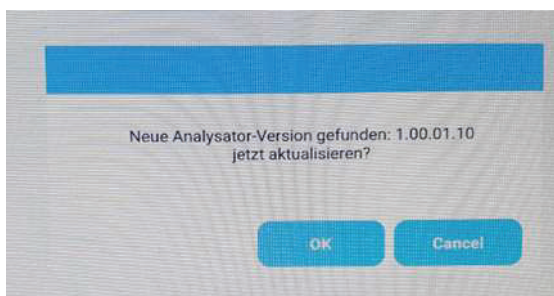

- Una vez finalizada la actualización aparecerá un mensaje en pantalla informando que apague el analizado.

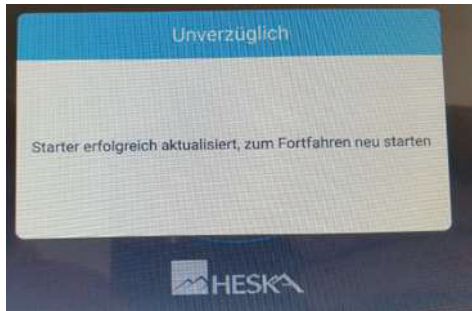

- Apague el analizador y Extraiga la unidad USB.
- Encienda de nuevo el instrumento: la actualización se ha completado.
- Compruebe la versión de actualización en la pantalla principal del instrumento, esquina superior derecha de la pantalla. Ha de ser la: **V. 1.00.01.44.**
- Si es así, la actualización está finalizada y realizada con éxito.
- Trabaje con normalidad.



Si tiene alguna pregunta sobre la instalación de la actualización de software, nuestra línea directa de servicio técnico está, por supuesto, disponible en Tlf: 948 82 46 55. Extensión 1.