


Encuentra más  
info aquí:

 **heskaView**  
Telecytology  
**GUÍA RÁPIDA DE USO**




## PRIMEROS PASOS

- Prep and stain slide(s).  
*Consulte el folleto del Protocolo de fluidos de Telecitología HeskaView.*
- Asegúrese de que el escáner esté encendido y que el software del escáner de diapositivas esté abierto en el escritorio.

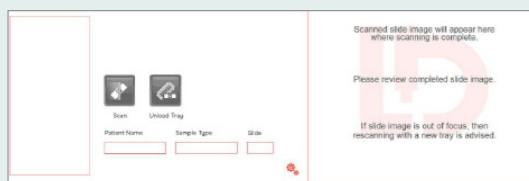

- Coloque el porta teñido boca arriba en la bandeja de cassette
- Evite las yemas de los dedos en el área a escanear
- Asegúrese de que los tres clips estén acoplados para mantener la diapositiva en su lugar en:

- 1- Base deslizante
- 2- lado deslizante
- 3- sobre los bordes esmerilados

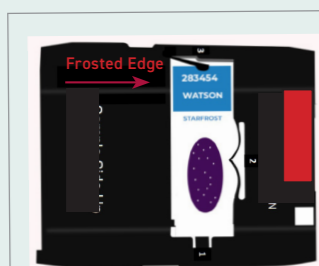


## CARGA DE LA BANDEJA DE CASSETTE /ESCANEO


- Cargue la bandeja de casetes en el escáner de diapositivas HeskaView.
- Tenga cuidado con el posicionamiento correcto, con el lado marcado de error colocado hacia la ranura



- Ajuste el área de escaneo en la imagen de vista previa haciendo clic y arrastrando el cuadro rojo al área de interés.

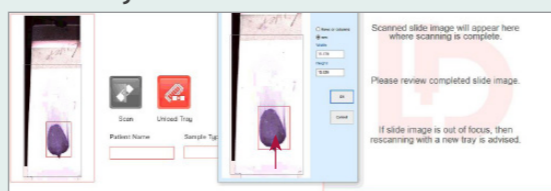


- Introduzca el nombre del paciente, el tipo de muestra y el número de diapositiva y, a continuación, haga clic en SCAN.

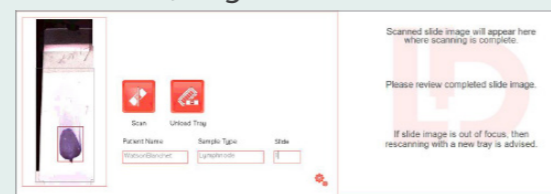


## UNA VEZ FINALIZADO EL ESCANEO

- Después de escanear una diapositiva, aparecerá en el cuadro de visualización a la derecha del software de escaneo.
- Compruebe que la muestra parece adecuada y está enfocada.
- Adjunte diapositivas al caso utilizando el portal de Telecitología y envíelas.

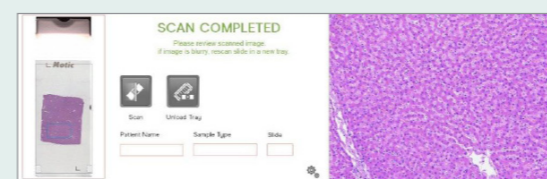

## INGRESE EL HISTORIAL DEL CASO Y ENVÍE EL ESCANEO

- Inicie sesión en el Portal Lacuna.
- Complete la información del paciente y del caso.

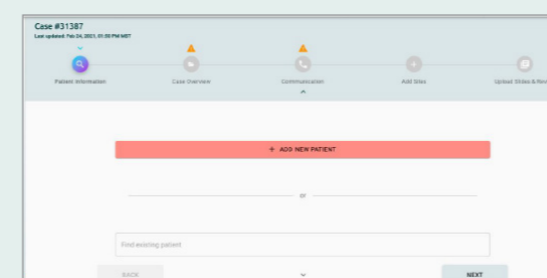

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Tiempo de escaneo estimado largo

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

Si un tiempo estimado de exploración parece ser inusualmente largo (es decir, >40 minutos):

- Detener el análisis
- Coloque la diapositiva en una bandeja de cassette diferente
- Volver a insertar y volver a escanear

## Error de alerta de enfoque

El error de alerta de enfoque está diseñado para detener el envío de diapositivas que se han escaneado mientras están al revés o muy inclinadas.

- Coloque la diapositiva en una bandeja de cassette diferente
- Reescaneo

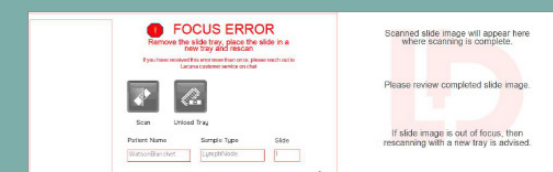

scil animal care company S.L.U  
Teléfono: +34 948 82 46 55  
+34 948 82 17 13  
E-Mail: info-es@scilvet.com  
scilvet.es